

Carestino

Manual de usuario

Sacaleche

ELÉCTRICO POCKET CON BATERÍA



SA002-BL

Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

El **Sacaleche Eléctrico Pocket con batería** es ideal para llevar al trabajo o a cualquier lugar, por sus programas automáticos y su batería recargable por USB. Compacto, portátil y fácil de utilizar. Es una práctica herramienta diseñada específicamente para prolongar la lactancia tanto como sea posible.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

SACALECHE

Ergonómico y fácil de usar



Protector de silicona



3 modos de succión



Incluye 1 mamadera

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 09
- 03  **Partes incluidas**
PAG 10
- 04  **Armado**
PAG 11
- 05  **Ajuste**
PAG 12
- 06  **Almacenamiento**
PAG 15
- 07  **Esterilización**
PAG 16
- 08  **Medidas**
PAG 17
- 09  **Garantía**
PAG 18

Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Consulte siempre a su asesor de lactancia o profesional de la salud sobre los tiempos recomendados de uso. Si la extracción se vuelve dolorosa, deténgase.



En caso de estar generando menos leche de la esperada o reconocer alguna característica inusual mientras se utiliza el producto, discontinúe su uso y busque la orientación de su médico.



Lave, enjuague y esterilice las partes según se indica en el manual, antes de cada uso.



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros componentes fuera del alcance de los niños.



Nunca deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o en el tubo de silicona.



Antes de cada uso, inspeccione el sacaleche para corroborar que no contenga signos de daños. No utilice el extractor y tampoco cargue el sacaleche si el dispositivo electrónico se encuentra dañado, no funciona correctamente, se ha caído, o se ha sumergido en agua.



No utilice el sacaleche mientras se baña.



No deje nunca al niño desatendido mientras toma de la mamadera.



Siempre verifique la temperatura del líquido antes de alimentar a su bebé.



Este producto está diseñado y destinado para uso personal. No se aconseja compartirlo con otras personas.



Desenchufe siempre el dispositivo del tomacorriente cuando haya completado su carga. No lo deje desatendido cuando esté enchufado.



Utilice siempre el sacaleche con la mamadera adecuada proporcionada por Carestino, para evitar derrames.



Inmediatamente después de su uso limpie todas las partes del producto.



Mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor.



Asegúrese siempre que las piezas estén bien encastradas antes de su uso. Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



¿Cómo esterilizo el sacaleche?

Desmunte todas las partes. Esterilice las partes plásticas (mamadera, tetina, cubierta para el pecho, masajeador de silicona y pistón) en agua a punto de hervir a fuego mínimo, durante 5 minutos. Evite que las partes no toquen el borde de la olla para evitar deformaciones y/o quemaduras de las partes. Por último, lave el resto de las piezas con agua caliente y jabón neutro. Vea las instrucciones y advertencias de limpieza en la **página 16**.



¿Cuántos modos de succión tiene?

El sacaleche cuenta con tres modos de succión que se pueden adaptar en diferentes niveles de intensidad.



¿Qué capacidad tiene la mamadera?

El sacaleche incluye una mamadera con una capacidad de 180 ml. Esto nos permite almacenar la leche en el refrigerador para luego poder utilizarla.



¿Cuánto dura la batería del sacaleche?

La duración de la batería del sacaleche tiene un tiempo aproximado de 2 hrs.




Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

Sacaleche

- A** Tapa protectora
- B** Ventosa de silicona
- C** Cubierta de silicona antiderrame
- D** Dispositivo digital de succión
- E** Extractor
- F** Válvula de succión (x2)
- G** Botella (180ml)
- H** Cable USB de alimentación AC

Mamadera


- I** Tapa de botella
- J** Tapa almacenamiento
- K** Botella (180ml)
- L** Tapa con tetina

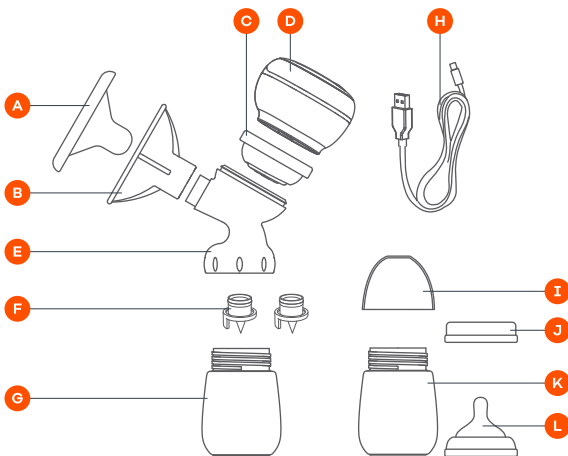

El producto cuenta con piezas pequeñas. Se recomienda manipularlo con cuidado para evitar el extravío de las mismas.



Armado del sacaleche

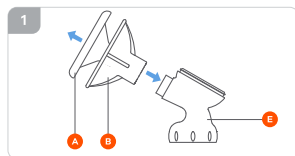

Paso 1: Retire la **tapa protectora (A)** y conecte la **ventosa de silicona (B)** en el **extractor (E)** para asegurar un ajuste perfecto (**fig.1**).



Paso 2: Coloque la **cubierta de silicona (C)** sobre el extractor para asegurar un ajuste perfecto (**fig.2**).



Paso 3: Fije la **válvula de succión (F)** debajo del extractor. Asegúrese que la válvula esté completamente hacia dentro (**fig.3**).



Paso 4: Gire la **botella (G)** en la parte inferior del extractor para que encaje herméticamente (**fig.4**).

Paso 5: Conecte el **dispositivo digital de succión (D)** sobre la cubierta de silicona en el extractor y presione para asegurar un ajuste perfecto (**fig.5**).



- Antes de utilizar el producto, compruebe si todas las piezas y partes están correctamente ensambladas.
- De no encender, procure que tenga batería conectándolo a una fuente de energía.




Configuración del dispositivo digital

Paso 6: Conecte el **cable USB (H)** al dispositivo digital y luego el otro extremo del cable de alimentación al adaptador de energía y enchufe el adaptador al toma corriente.



- Se puede conectar una computadora o a un cargador portátil.
- **La duración de la batería es de 2 horas.**

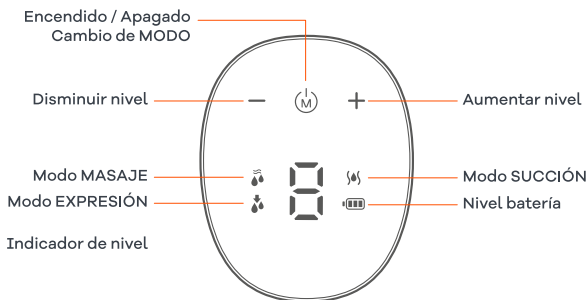

Modos de frecuencias de absorción

Modo MASAJE (1-5): Por defecto comienza en nivel 1, en este modo el símbolo “” está prendido. El dispositivo entrará automáticamente en modo SUCCIÓN después de dos minutos.

Modo EXPRESIÓN (1-9): Por defecto comienza en nivel 1, en este modo el símbolo “” está prendido.

Modo SUCCIÓN (1-9): Por defecto comienza en nivel 1, en este modo el símbolo “” está prendido.

Intercambiar entre MODOS: Intercambie entre modos, presionando el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**. El nivel de succión se puede incrementar y reducir en su respectivo modo, por defecto comienza en **nivel 1 del modo MASAJE**. Después el dispositivo cambiará al **modo de SUCCIÓN en nivel 1 de potencia**.



Carga de batería

Paso 1: La pantalla del dispositivo muestra el nivel de batería con el símbolo "🔋". Al parpadear en rojo indicará que el dispositivo necesita recargar su batería.

Paso 2: Cuando el dispositivo se encuentre conectado a una fuente de energía el símbolo "🔋" parpadeará; cuando finalice la recarga, el dispositivo entrará en modo reposo y el símbolo "🔋" estará en color verde.



El sacaleche debe estar apagado antes de conectarlo a un adaptador de energía de 5V/1A (no incluido). El dispositivo no se puede recargar si se enciende al estar conectado a una fuente de energía.

Uso y extracción

Paso 1: Lave sus manos antes de usar el sacaleche, asegúrese de que las partes del extractor estén limpias y montadas correctamente.

Paso 2: Retire la tapa del extractor de leche y coloque el centro del extractor en el pezón. Asegúrese que esté ajustado y no entre ni salga aire (fig.1).

Se recomienda relajarse y utilizar una almohadilla térmica de gel o una toalla caliente antes de comenzar el proceso de extracción.

Paso 3: Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO / APAGADO "🔘" por 3-5 segundos para encender el dispositivo (fig.2).





Paso 4: Iniciará en **modo MASAJE** “☺” con un ritmo de absorción rápido y corto.


Paso 5: Presione las teclas “+” ó “-” para ajustarlo en cualquier momento de **nivel 1 a 5 (fig.2)**. Luego de dos minutos, cambiará a **modo SUCCIÓN (fig.3)**.

Paso 6: Presione el botón “☺” si desea cambiar entre **modos MASAJE, EXPRESIÓN o SUCCIÓN**. Presione las teclas “+” ó “-” para ajustarlo al nivel deseado.

Paso 7: Después de su uso, mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO / APAGADO “☺”** por 3-5 segundos para apagar el extractor (**fig.4**).

El dispositivo posee función de memoria. En su primer uso los modos estarán en NIVEL 1. Luego de configurarlos a su gusto, al prenderlo próximamente, recordará los últimos niveles configurados.

Paso 8: Al finalizar la extracción, desmonte el sacaleche, limpie y esterilice las partes no electrónicas para el siguiente uso.

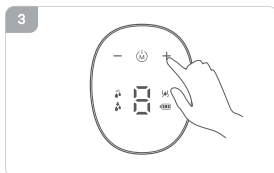




Almacenamiento y calentamiento

Paso 1: Después de extraer la leche materna, separe la botella del extractor.

Paso 2: Enrosque la **tapa con tetina (L)** en la botella para utilizarla o utilice la **tapa de almacenamiento (J)** y guárdela en la heladera para su correcta refrigeración (**fig.1**).

Si se desea congelar la leche materna, **no debe exceder 3/4 del volumen total de la botella.**

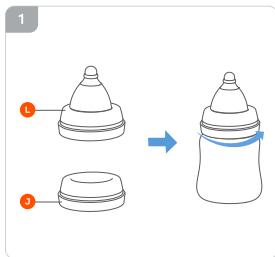

Siempre asegúrese que hayan quedado bien encastradas las partes antes de darle la mamadera al bebé.



Agite el recipiente para mezclar la leche antes de su uso.

IMPORTANTE

Utilice siempre un recipiente apto para alimentos, con tapa. Recuerde que cada vez que guarde leche, debe rotular el envase colocando la fecha de la extracción. **Luego cuando quiera utilizarla, use primero la leche que tiene más días de extraída.**

PARA CONSERVAR LA LECHE:

- Puede guardarla en **heladera hasta 3 días.**
- Si la leche no será utilizada durante los días inmediatos a la extracción, lo ideal es guardarla en el **freezer** donde podrá ser óptimamente conservada **hasta 6 meses.**
- Tenga en cuenta que, como todo alimento, debe ser conservada en frío inmediatamente luego de ser extraída; sin embargo, en ciertas situaciones donde no se tenga acceso inmediato a refrigeración, la misma podría ser mantenida a **temperatura ambiente (16-29°C) hasta 4 horas.**
- **Una forma de descongelar la leche**, si está congelada, es bajándola del freezer a la heladera. También puede descongelarla a baño maría (nunca sobre el fuego directamente) o bajo el chorro de agua caliente.
- **No hervir ni utilizar microondas** para entibiar la leche.
- **El excedente de leche ya calentada, debe desecharse.**



Limpieza y esterilización



- > Es importante que realice este procedimiento **antes de utilizar el producto y luego de cada uso.**
- > No limpie el dispositivo ni las piezas con productos antibacterianos, abrasivos o detergentes.

Paso 1: Desmunte todas las partes.

Paso 2: Esterilice las partes plásticas (botellas, tetina, cubierta para el pecho, masajeador de silicona y pistón) en **agua a punto de hervir a fuego mínimo, durante 5 minutos.**

Evite que las partes toquen los bordes de la olla para evitar que se quemen y/o deformen.

Paso 3: Lave el resto de las piezas con agua caliente y jabón neutro.

Paso 4: Colóquelas sobre una toalla seca en un lugar fresco y con sombra hasta que se sequen.

Paso 5: Limpie el dispositivo electrónico con un paño húmedo –no mojado–, evitando hacer fuerza para no rayarlo.

Paso 6: Arme el sacaleche, sin ejercer fuerza, siguiendo las instrucciones de armado (**pág 10**).

IMPORTANTE

Para mantener el sacaleche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



No utilizar productos que contengan tricloroetileno.



Sacaleche

Alto: 20 cm

Ancho: 15 cm

Díametro ventosa : 8,8 cm

Conexión: USB

Mamadera

Ancho: 7,2 cm

Boca: 4,5 cm

Capacidad: 160 ml

Libre de ftalatos. No tóxico.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, comuníquese con nuestro canal de atención: **ventas@carestino.com**



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino