

Carestino

Manual de usuario

Sacaleche

MANOS LIBRES



Importante



Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 09
- 03  **Partes incluidas**
PAG 10
- 04  **Armado**
PAG 11
- 05  **Ajuste**
PAG 13
- 06  **Almacenamiento**
PAG 15
- 07  **Esterilización**
PAG 16
- 08  **Medidas**
PAG 17
- 09  **Garantía**
PAG 18

Gracias por elegirnos

y confiar en nosotros.

El **Sacaleche Manos Libres** es una práctica y moderna herramienta diseñada para acompañar la lactancia de forma cómoda y eficiente, permitiendo extraer leche mientras se realiza otras actividades. Su diseño portátil y silencioso ofrece libertad de movimiento sin comprometer la eficacia de la extracción.

Cuenta con múltiples modos y niveles de succión, que ayudan a estimular el flujo natural de la leche materna y a aliviar la congestión mamaria. Su copa de silicona suave se adapta cómodamente al pecho, brindando un ajuste seguro y confortable, favoreciendo una experiencia de uso más natural y placentera.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

SACALECHE

Ergonómico y fácil de usar



Masajeador
silicona



4 modos
de succión



Batería
de Litio



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Consulte siempre a su asesor de lactancia o profesional de la salud sobre los tiempos recomendados de uso. Si la extracción se vuelve dolorosa, deténgase.



En caso de estar generando menos leche de la esperada o reconocer alguna característica inusual mientras se utiliza el producto, discontinúe su uso y busque la orientación de su médico.



Lave, enjuague y esterilice las partes según se indica en el manual, antes de cada uso.



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros componentes fuera del alcance de los niños.



Nunca deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o en el tubo de silicona.



Antes de cada uso, inspeccione el sacaleche para corroborar que no contenga signos de daños. No utilice el extractor y tampoco cargue el sacaleche si el dispositivo electrónico se encuentra dañado, no funciona correctamente, se ha caído, o se ha sumergido en agua.



No utilice el sacaleche mientras se baña.



No deje nunca al niño desatendido mientras toma de la mamadera.



Siempre verifique la temperatura del líquido antes de alimentar a su bebé.



Este producto está diseñado y destinado para uso personal. No se aconseja compartirlo con otras personas.



Desenchufe siempre el dispositivo del tomacorriente cuando haya completado su carga. No lo deje desatendido cuando esté enchufado.



Utilice siempre el sacaleche con el contenedor adecuado y proporcionado por Carestino, para evitar derrames.



Inmediatamente después de su uso limpie todas las partes del producto.



Mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor.



Asegúrese siempre que las piezas estén bien encastradas antes de su uso. Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



¿Cómo esterilizo el sacaleche?

Desmonte todas las partes. Esterilice las partes plásticas (mamadera, tetina, cubierta para el pecho, masajeador de silicona y pistón) en agua a punto hervor a fuego mínimo, durante 5 minutos. Evite que las partes no toquen el borde de la olla para evitar deformaciones y/o quemaduras de las partes. Por último, lave el resto de las piezas con agua caliente y jabón neutro. Vea las instrucciones y advertencias de limpieza en la **página 15**.

¿Cuántos modos de succión tiene?

El sacaleche cuenta con 4 modos de succión, cada uno con 9 niveles de intensidad, permitiendo adaptar la extracción a las necesidades de cada momento de la lactancia.

¿Qué capacidad tiene el contenedor de leche?

El contenedor de leche tiene una capacidad de 150 ml.


¿Cuánto dura la batería del sacaleche?

El tiempo de funcionamiento de la batería es de 2 hr 40 min., y un tiempo de carga de 1 hr 50 min.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| A Ventosa silicona 24 mm | E Dispositivo extractor | H Adaptador 19 mm |
| B Cuelpo conector | F Diafragma | I Adaptador 21 mm |
| C Silicona anti-retorno | G Contenedor de Leche | J Cable USB |
| D Válvula de succión | | |

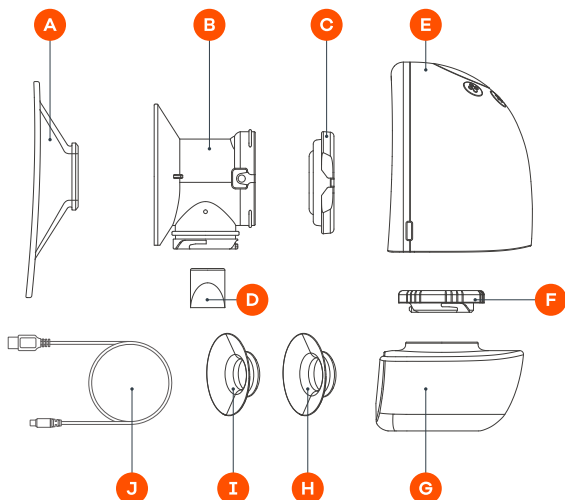


El producto cuenta con piezas pequeñas. Se recomienda manipularlo con cuidado para evitar el extravío de las mismas.




Ensamblaje

Paso 1: Coloque la **silicona anti-retorno (C)** sobre el **cuerpo conector (B)**.


Asegúrese de que las ranuras de ambos lados coincidan con las pestañas del conector y presiónelo bien hasta que quede firme (**fig.1**).

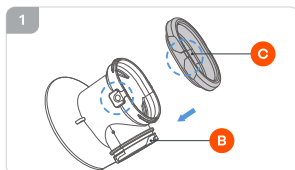


Paso 2: Inserte la **válvula de succión (D)** en el cilindro ubicado debajo del cuerpo conector y empujela hasta el fondo para que encaje correctamente (**fig.2**).

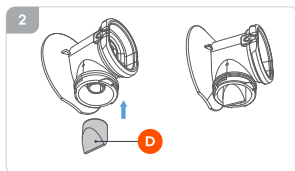

Paso 3: Alinee la pestaña del interior del **contenedor de leche (G)** con la ranura debajo del conector y gírelo en sentido horario hasta que quede fijo. Al terminar, la línea central del biberón debe coincidir con la del conector (**fig.3**).

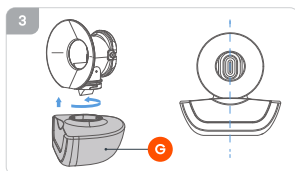


Paso 4: Encaje el conjunto de cuerpo conector + contenedor en el **dispositivo extractor (E)**, hasta asegurarse de que quede bien ajustado (**fig.4**).

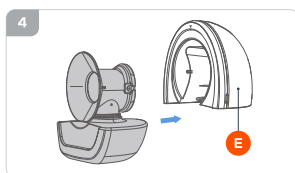




Paso 5: Alinee la marca (▲) de la **ventosa de 24 mm (A)** con el triángulo invertido (▼) de la unidad principal, y presione el anillo central de la ventosa para que quede bien ajustado al conector (**fig.5**).

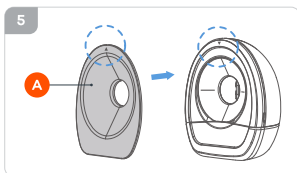

Paso 6: Si el pezón de la madre es más chico, primero coloque la ventosa de 24 mm en la máquina y luego inserte un adaptador de 19 mm o 21 mm (H-I) (**fig.6**).

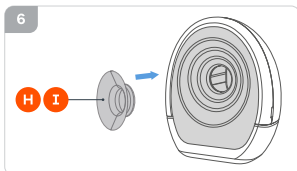


Antes de comenzar la extracción, asegúrese de que todas las partes estén correctamente ensambladas y ajustadas firmemente.

Conexión y funcionamiento

Paso 1: El sacaleche utiliza un **cable de carga USB (J)** y permite varias formas de alimentación:


- Conexión a puerto USB en PC / laptop.
- Conexión a un adaptador de corriente.
- Conexión a cargador portátil de energía.

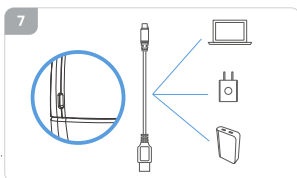

- **Apague el sacaleches antes de conectarlo al cargador.**
- **Si el ícono de batería parpadea durante el inicio o el uso, cargue el sacaleches inmediatamente.**
- **Al cargar, el ícono parpadea para indicar que se está cargando; cuando está completamente cargada, el ícono permanece encendido.**
- **Tiempo de carga: aprox. 110 minutos. / Tiempo de funcionamiento: hasta 160 minutos.**



Panel de extracción

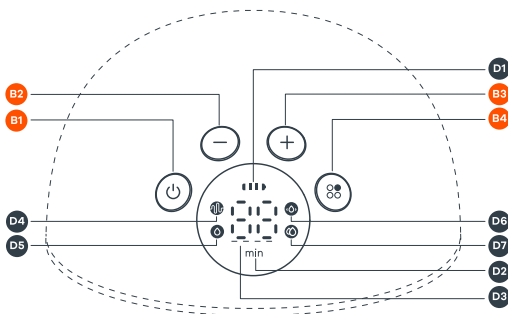

Botones

- B1** Encendido/Apagado/Pausa
- B2** Disminuir nivel de succión
- B3** Aumentar nivel de succión
- B4** Cambiar Modo

Display

- D1** Indicador de batería
- D2** Indicador de tiempo
- D3** Indicador de nivel / tiempo
- D4** Modo Masaje
- D5** Modo Extracción
- D6** Modo Estimulación
- D7** Modo Automático

Niveles de frecuencia de absorción

Modo Masaje (niveles 1-9)

Movimientos cortos y rápidos para reducir molestias y estimular el inicio del flujo de leche.

Modo Extracción (niveles 1-9)

Succión lenta y profunda que favorece la salida de leche.

Modo Estimulación (niveles 1-9)

Succión corta y alternada para vaciar el pecho de forma eficiente.

Modo Automático (niveles 1-9)

Combina succión lenta y rápida para estimular el drenaje del pecho.



Uso y extracción

Paso 1: Lave bien sus manos antes de usar el sacaleche y asegúrese de que todas las piezas estén limpias y correctamente ensambladas.

Paso 2: Coloque el extractor centrado en el pezón, asegurándose de que quede bien ajustado y sin fugas de aire (**fig.1**).

Tip: Relájese y, si lo desea, use una compresa tibia antes de comenzar.

Paso 3: Mantenga presionado el botón de **encendido/apagado (B1)**. El equipo se inicia en modo Masaje con 5 niveles predeterminados. Tras unos segundos sin uso, la pantalla muestra el tiempo de funcionamiento (**fig.2**).

Paso 4: Pulse brevemente el botón de **cambio de modo (B4)** para alternar entre Masaje, Extracción, Estimulación o Automático (**fig.3**).


Paso 5: Presione "+" o "-" para ajustar la intensidad de succión de cada modo. El modo automático funciona de nivel 1 a 7 por defecto (**fig.4**).

Paso 6: Una vez finalizado, transfiera la leche a un recipiente de almacenamiento adecuado (**fig.5**).


Paso 7: Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado para apagar, o presiónelo para Pausar/Reanudar.

Con la función memoria, al encender se activará el último modo y nivel usado. El equipo se apaga automáticamente tras 20 minutos de uso efectivo (sin contar pausas).


1

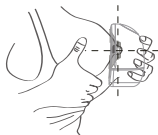

2

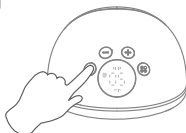

3

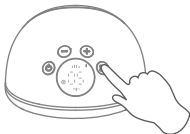

4



5





Almacenamiento y calentamiento



Utilice siempre un recipiente apto para alimentos, con tapa. Recuerde que cada vez que guarde leche, debe rotular el envase colocando la fecha de la extracción. **Luego cuando quiera utilizarla, use primero la leche que tiene más días de extraída.**

Conservación de la leche materna:

- Recién extraída dura hasta **4 horas a temperatura ambiente (16–25°C)**.
- Refrigerada en heladera **hasta 3–4 días (4°C)**.
- Si la leche no será utilizada durante los días inmediatos a la extracción, puede frizarla conservada **de 6 a 12 meses (-18°C)**.
- La leche debe ser descongelada entre **1–2 h a temperatura ambiente (25°C) o hasta 24 h en refrigerador (4°C)**. **Nunca volver a congelar leche materna si ya fue congelada anteriormente.**
También puede descongelarla a baño maría (nunca sobre el fuego directamente) o bajo el chorro de agua caliente.
- **No caliente la leche congelada en el microondas ni en agua hirviendo** para evitar la pérdida de nutrientes y quemaduras en el bebé.
- Sobrante de una toma: debe desecharse si no se consume **dentro de las 2 h siguientes**.
- Para congelar, **no llene más de ¾ del recipiente** para permitir la expansión.
- Antes de usar, **agite el envase** suavemente para homogeneizar la leche.



Limpieza y esterilización



- Es importante que realice este procedimiento **antes de utilizar el producto y luego de cada uso.**
- No limpie el dispositivo ni las piezas con productos antibacterianos, abrasivos o detergentes.

Paso 1: Desmonte todas las partes.

Paso 2: Esterilice las partes plásticas (botellas, tetina, cubierta para el pecho, masajeador de silicona y pistón) en **agua a punto de hervor a fuego mínimo, durante 5 minutos.**

Evite que las partes toquen los bordes de la olla para evitar que se quemen y/o deformen.

Paso 3: Lave el resto de las piezas con agua caliente y jabón neutro.

Paso 4: Colóquelas sobre una toalla seca en un lugar fresco y con sombra hasta que se sequen.

Paso 5: Limpie el dispositivo electrónico con un paño húmedo –no mojado–, evitando hacer fuerza para no rayarlo.

Paso 6: Arme el sacaleche, sin ejercer fuerza, siguiendo las instrucciones de armado (**pág 10**).

IMPORTANTE

Para mantener el sacaleche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



No utilizar productos que contengan tricloroetileno.



Especificaciones técnicas

Ancho: 7,5 cm

Capacidad: 150 ml

Conexión: USB



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto, visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino