

# Carestino

Manual de usuario

## Sacaleche

ELÉCTRICO CON MAMADERA



SA003

# Gracias por elegirnos

**Esperamos que lo disfrutes.**

El **SACALECHE** es una práctica herramienta diseñada específicamente para prolongar la lactancia tanto como sea posible. Éste sacaleche eléctrico cuenta con tres modos de succión, ayudando a estimular el flujo de la leche materna y a prevenir la congestión mamaria. Su copa posee masajeador de silicona para un ajuste natural, ayudando a estimular el flujo de la leche materna.

**Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.**





# Índice

- 01  **Seguridad**  
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**  
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**  
PAG 09
- 04  **Armado**  
PAG 10
- 05  **Ajuste**  
PAG 11
- 06  **Almacenamiento**  
PAG 14
- 07  **Medidas**  
PAG 15
- 08  **Cuidado**  
PAG 16
- 09  **Garantía**  
PAG 17

# Importante

---



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

---

- > **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- > **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Guarde las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



En caso de estar generando menos leche de la esperada o reconocer alguna característica inusual mientras se utiliza el producto, discontinúe su uso y busque la orientación de su médico o pediatra.



Antes de cada uso, inspeccione el sacaleche para corroborar que no contenga signos de daños. No utilice el extractor si no funciona correctamente.



Este producto está diseñado y destinado para uso personal. No se aconseja compartirlo con otras personas.



Inmediatamente después de su uso limpie todas las partes del producto.



Mantenga el producto lejos del fuego o fuentes de calor.



Asegúrese siempre que las piezas estén bien encastradas antes de su uso. Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



### ¿Cómo esterilizo el sacaleche?

Desmonte todas las piezas, límpielas con abundante agua y jabón neutro ayudándose con un cepillo y enjuaguelas bien. Ponga a hervir agua en una olla y cuando rompa el hervor, baje la temperatura a mínimo y déje las piezas en el agua durante 5 minutos y retírelas.

### ¿Cuántos modos de succión tiene?

El sacaleche cuenta con tres modos de succión. El primer modo cuenta con 4 niveles de succión y permite la posibilidad de realizar succiones lentas y profundas para favorecer un mayor flujo de extracciones.

El segundo modo cuenta 5 niveles e imita la succión del bebé con succiones más lentas, más profundas y más largas. Además, incluye un modo opcional para los casos especiales que se necesite eliminar por completo la leche del pecho y evitar la congestión mamaria.

### ¿Qué capacidad tiene la mamadera?

El sacaleche incluye 2 mamaderas con una capacidad de 150 ml cada una. Esto nos permite almacenar la leche en el refrigerador para luego poder utilizarla.



## Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:


### Sacaleche

- A** Cubierta del extractor de leche
- B** Ventosa de silicona
- C** Extractor
- D** Cubierta de silicona antiderrame
- E** Cubierta superior antiderrame

- F** Tubo de conexión
- G** Válvula de succión
- H** Base de soporte
- I** Mamadera (150 ml)
- J** Dispositivo electrónico de succión.
- K** Cable USB

### Mamadera extra

- L** Mamadera (150ml)
- M** Tapa de mamadera
- N** Disco sellador a rosca
- O** Tapa interior
- P** Tetina

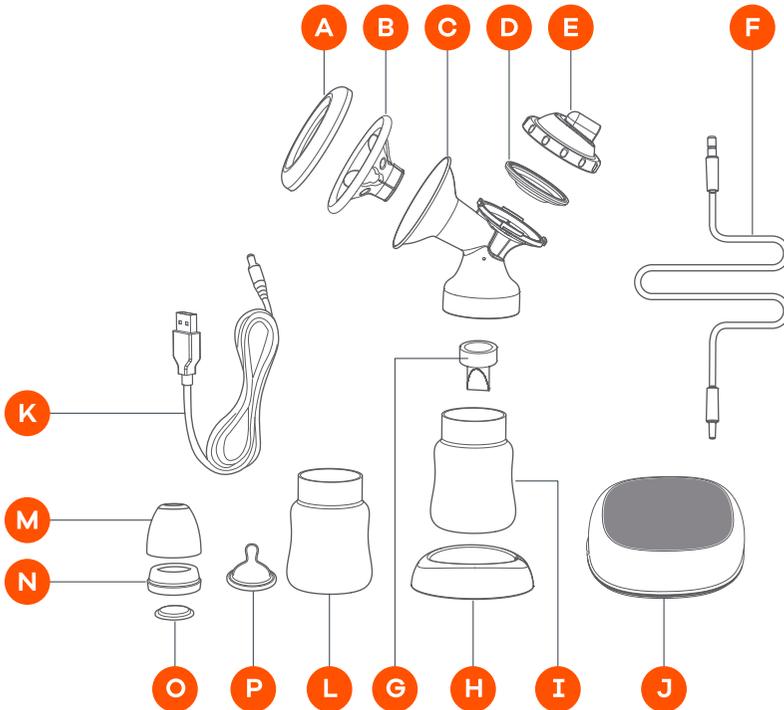



## Ensamblaje

Inserte la ventosa de silicona para realizar el masaje en el extractor de leche (**fig.1**).

Coloque la cubierta de silicona antiderrame en el cuerpo del extractor y gire la cubierta superior antiderrame como se muestra en la figura (**fig.2**).

Fije la válvula de succión en el extremo inferior del extractor de leche (**fig.3**).


Para conectar la parte superior del extractor de leche con la mamadera de cuello ancho, gire hasta que ajuste bien (**fig.4**).

Inserte el tubo de conexión (el lado con el borde de silicona) en la interfaz de la tapa superior antiderrame. Introduzca el otro extremo del tubo de conexión en la ranura de succión del extractor (**fig.5**).

Finalmente, ajuste la mamadera a la base soporte (**fig.6**).



### IMPORTANTE

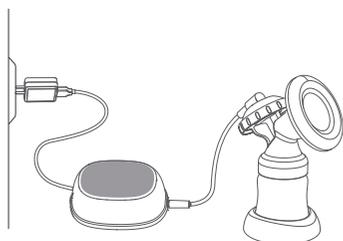

#### CONEXIÓN:


Inserte el extremo del cable USB a la entrada del dispositivo y el otro extremo (USB) al adaptador de alimentación.

**Enchúfelo al toma de corriente de la pared, a una computadora o a un cargador portátil.**



## Panel de extracción

El dispositivo electrónico es portátil e incluye función de memoria. Funciona conectado a una toma de corrientes, una computadora o un cargador portátil.

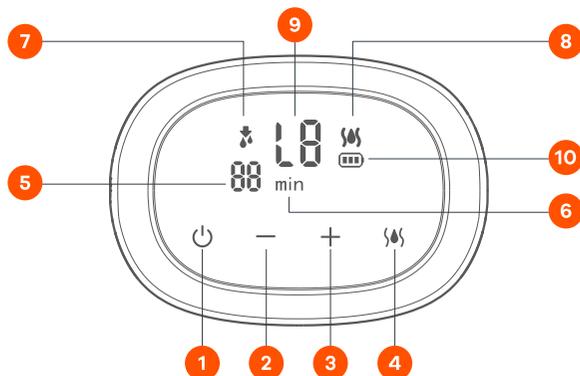

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 Encendido/apagado          | 6 Unidad de tiempo         |
| 2 Disminuir nivel de succión | 7 Indicador modo EXPRESIÓN |
| 3 Aumentar nivel de succión  | 8 Indicador modo BIÓNICO   |
| 4 Modo BIÓNICO               | 9 Indicador de nivel       |
| 5 Indicador de tiempo        | 10 Indiador batería        |

### Niveles de frecuencia de absorción

L1 a L4

**Modo MASAJE**, con un ritmo de absorción rápido y corto. Posee **4 niveles de velocidad**.

L5 a L9

**Modo EXPRESIÓN**, imita la succión de un bebé. El ritmo de esta fase es más lento, más profundo y más largo. Posee **5 niveles de velocidad**.

L1 a L5

**Modo BIÓNICO**, evita la sedimentación de leche en el pecho, buscando prevenir la congestión mamaria y la mastitis (**la máquina entra en modo de espera 5 minutos después de iniciar este modo por defecto**).





## Uso y extracción

Lave sus manos antes de usar el sacaleche, asegúrese de que las partes del extractor estén limpias y montadas correctamente. Relájese y utilice una almohadilla térmica de gel o una toalla caliente antes de comenzar el proceso de extracción.

Coloque el centro del extractor en el pezón. Asegúrese que esté ajustado y no entre ni salga aire (**fig.1**).

Al enchufar el dispositivo a una fuente de energía, se pondrá en estado de espera. Al presionar el botón de **ENCENDIDO / APAGADO "⏻"**, empezará el indicador de tiempo a correr (**fig.2**).

Inicialmente parpadeará dos veces indicando el nivel utilizado por última vez (por defecto mostrará L5) y volverá al nivel inicial.

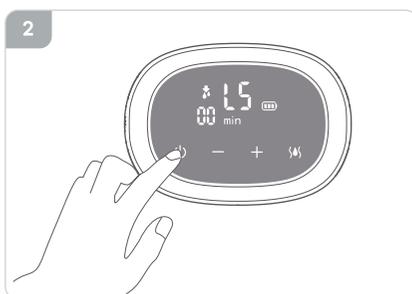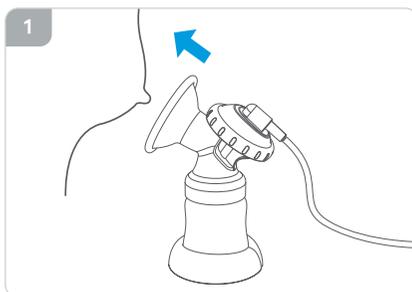


## Modos de extracción

### 1er FASE:

El nivel predeterminado es el **modo MASAJE**, con un ritmo de absorción rápido y corto, que va de **L1 a L4**.

Cada nivel tendrá una duración de 45 segundos, para estimular la mama, que irá cambiando de L1 a L4.

Éste modo tiene una **duración total de 180 segundos** y luego pasará a L5 para empezar el siguiente modo (**fig.3**).

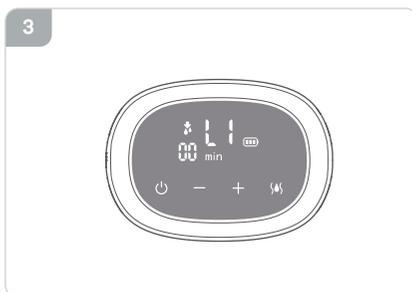



## 2da FASE:

Una vez que el extractor llegue a **L5** se iniciará el **modo EXPRESIÓN**, con un ritmo de absorción más lento, más profundo y más largo.

Pulse el botón “+” ó “-” para seleccionar cualquier **nivel de L5 a L9**. En la siguiente extracción de leche, el dispositivo recordará el nivel anterior que ha seleccionado al encender el dispositivo (**fig.4**).



## 3ra FASE (opcional):

Si al completarse la extracción aún siente que su seno tiene todavía un poco de leche, presione el botón de **modo BIÓNICO** “”, y seleccione cualquier **nivel de L1 a L5** (**fig.5**).

Después de 5 minutos de funcionamiento en este modo, el dispositivo entrará en modo de espera y se detendrá la actividad.



**Recomendamos que NO repita este procedimiento todos los días. Consulte a su médico para saber la frecuencia con la que debe hacerlo.**

Al finalizar la extracción, desmonte el sacaleche, limpie y esterilice las partes no electrónicas para el siguiente uso.

### IMPORTANTE



#### Esterilización y limpieza de las partes:

Ponga a hervir agua en una olla y **cuando rompa el hervor, baje la temperatura a mínimo**. Desmonte todas las piezas, límpielas con abundante agua y jabón neutro ayudándose con un cepillo y enjuaguelas bien. Finalmente, coloque las piezas en la olla **con la temperatura en mínimo durante 5 minutos y retírelas**.

Limpie el dispositivo electrónico con un paño húmedo -no mojado-, evite utilizar paños que puedan rayar la superficie.



## ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO

Después de extraer la leche materna, separe la mamadera del resto de las piezas, colóquela la tapa y guárdela en la heladera.

Si se desea congelar la leche materna, **no debe exceder 3/4 del volumen total de la mamadera.**

La leche materna debe descongelarse naturalmente en la heladera o bien en agua caliente a menos de 37° C. **No se recomienda el uso de microondas o agua hirviendo.**

Antes del uso, agite el recipiente para mezclar la leche.

### IMPORTANTE

Utilizá siempre un recipiente apto para alimentos, con tapa. Recordá que cada vez que guardes leche, debes rotular el envase colocando la fecha de la extracción. **Luego cuando vayas a usarla, usá primero la leche que tiene más días de extraída.**

#### PARA CONSERVAR LA LECHE:

- Podés guardarla en **heladera hasta 3 días.**
- Si la leche no será utilizada durante los días inmediatos a la extracción, lo ideal es guardarla en el **freezer** donde podrá ser óptimamente conservada **hasta 6 meses.**
- Tené en cuenta que como todo alimento, debe ser conservada en frío inmediatamente luego de ser extraída; sin embargo, en ciertas situaciones donde no se tenga acceso inmediato a refrigeración la misma podría ser mantenida a **temperatura ambiente (16-29°C) hasta 4 horas.**
- **Una forma de descongelar la leche**, si está congelada, es bajándola del freezer a la heladera. También podés descongelarla a baño maría (nunca sobre el fuego directamente) o bajo el chorro de agua caliente.
- **No hiervas ni uses microondas** para entibiar la leche.
- **El excedente de leche ya calentada, debe desecharse.**



## Sacaleche

Alto: 22 cm

Ancho: 9 cm

Peso total: 6 kg

Conexión: USB 220V

## Mamadera

Alto: 9 cm

Ancho: 6,5 cm

Boca: 4,95 cm

Libre de ftalatos. No tóxico.



## CUIDADOS

- > Antes de utilizar el producto, desmonte todas las partes para su previa limpieza y esterilización. Debe lavarlas con agua caliente y jabón neutro.
- > Después de limpiarlas, colóquelas sobre una toalla seca en un lugar fresco y con sombra.
- > Esterilice la mamadera, la tetina, la cubierta para el pecho y el masajeador de silicona luego de cada uso **(pág. 13)**.

## MANTENIMIENTO

- > La limpieza posterior a su uso y el mantenimiento regular es necesario. Desmonte o ensamble las piezas de acuerdo a las instrucciones de armado, sin ejercer fuerza cuando se limpien las piezas para evitar el mal funcionamiento.
- > No limpie el dispositivo con productos abrasivos, utilice un paño húmedo para evitar rayar el producto y la pantalla.

## IMPORTANTE

Para mantener el sacaleche en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.



Lavar a mano.



No utilizar cloro.



No utilizar productos que contengan tricloroetileno.



## Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- › El desgaste natural del producto.
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto aquellas realizadas por Carestino).



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.





**Carestino**